


姿勢の調節 腰痛治療・転倒予防のための 仙腸装具



一般用

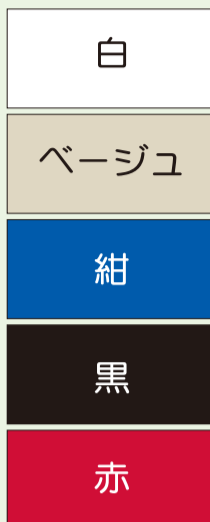

上の色から選べます。



夏用
(メッシュタイプ)

(※保険が適用されます)

仙腸装具について

〔目的〕

- 姿勢の調節障害によって歩行などの動作が不安定となり、腰痛、肩こり、転倒、高齢者の「ふらつき」が引き起こされる事が多い。
- 脳卒中後の歩行障害、脳性麻痺のバランス障害に対しても有効である。
- 姿勢の調節に関係の深い仙腸関節を安定化させる目的で考案されたものがこの仙腸装具です。

〔特徴〕

- ① 200gの重りが付いていて重心位置を下へ移動させるため、いろいろな動作を行う時に重心のバランスがとりやすく、姿勢を調節しやすくなります。
- ② 後方にある重り部分が暖かくなります。
- ③ 腹圧(腹筋)をしっかりサポートします。

〔品質〕


- ① 肌面素材に「エーゲジャージ系」を使い、吸汗、発散性に富み、芯材に「圧縮ウレタン」を使用し通気性とフィット性を兼ね備え、表地に「フレンチパイル」を使用しています。
- ② 夏用はメッシュの素材を使用しています。
- ③ 色はベージュ、紺、黒、赤、白

〔お手入れ〕

洗濯は重りをはずしてから中性洗剤で押し洗いし、直射日光を避けて日陰で干してください。

〔装着方法〕

- ① 仙椎(仙腸関節)を安定させる目的で、骨盤をしっかり包むように装着してください。この時に上にずらして腹部へ装着すると、仙腸関節が安定せず、かえって腰に負担がかかる場合がありますのでご注意ください。
- ② 従来の腰椎コルセットの位置ではありません。
(本装具は東邦大学リハ科と幸和義肢研究所で開発したものです)

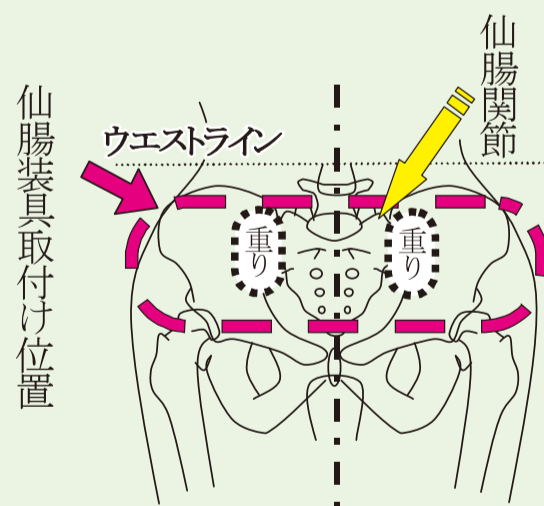

文献 原田 孝(東邦大・リハ科)

(ア) NHKテレビ「生活ホットモーニング」2000年11月17日放送

(イ) 第17回日本義肢・装具学会講演集 P.188-189,2001

(ウ) 整形災害外科 2007.7月号

(エ) Medical Rehabilitation12 P.38-39,2001

(オ) 読売新聞「医療ルネッサンス」2004年3月20日朝刊

東京小児療育病院

【連絡先】
株式会社 幸和義肢研究所
(担当:横張・中島)
〒300-4212 茨城県つくば市神郡369-2
電話 029 (850) 7055 FAX 029 (850) 7101

